

The background of the slide features a grayscale photograph of a city skyline with various skyscrapers. A large, solid red rectangular area covers the left and central portions of the image, serving as a backdrop for the white text. The text is centered within this red area.

ERNEUERUNG DER MPBETREIBV §12

Fernüberwachung für AED's ab
2027 vorgeschrieben

CARDILINK

Vorteile für Sie?

Mit CardiLink ist Ihr CaridAid AED bereits jetzt für die Zukunft gerüstet. Jederzeit ist online dessen Funktion und eventuelle Bewegungen kontrollierbar. Das bringt Sicherheit und Entlastung Ihrer Mitarbeiter.

Im Rahmen der Medizinprodukte Betreiberverordnung sind somit alle Dinge im Automatismus abgedeckt. In der CardiLink Plattform sind neben der ununterbrochenen Überwachung der Funktion auch die Verfallsdaten der Elektroden und Batterien hinterlegt.

Gleichzeitig können Sie jederzeit die Restlaufzeit der Ersatzteile oder die Laufzeit zum nächsten Service kontrollieren.

Sollte sich der AED bewegen, oder eine Störmeldung festgestellt haben, sendet dieser sofort an von Ihnen jeweils hinterlegten Personen eine Warnmeldung mit den aktuellen Koordinaten.

KANN ICH NACHTRÄGLICH CARDILINK INSTALLIEREN?

Bei jedem CARDIAID Defibrillator mit Firmware 11.11... ist die Installation im Nachhinein möglich. Hierzu wird das Sendemodul an eine mitgelieferte Halterung geschraubt.

Durch das Herunterladen der CardiLink App (Android oder Apple) ist die Installation ein Kinderspiel. Diese leitet Sie automatisch durch die einzelnen Schritte, um das Gerät mit dem Server zu verbinden. Dies nimmt ca. 10 Minuten in Anspruch.

Weiterhin besteht die freiwillige Möglichkeit der Bekanntgabe des Standortes Ihres Gerätes, um anderen Helfern über die Verfügbarkeit Ihres Gerätes zu informieren.

The screenshot displays the CardiLink web dashboard. On the left is a navigation menu with options like Dashboard, Übersicht, and Adresse & GPS-Koordinaten. The main content area shows:

- AED Details:** AED: 322100309, Modell Nr: CT02079F, Eigentümer: Inweggarten 322100309, Beschreibung: Inweggarten 322100309, Firmware: 11.11.11.11.11, Aktiv seit: Thu, March 02, 2023 14:07:23.
- Herz verbinden:** 3816044891306, Verbunden seit: Wed, April 26, 2023 03:56:15.
- Servicetickets:** Für dieses Gerät wurden keine Servicetickets erstellt.
- Adresse und GPS-Koordinaten:** Außere Hauptstraße 10, Neudöbberg, Eisenmny.
- Barrierefreiheit:** 24/7, Außerhalb eines Gebäudes.
- Letzte Nachrichten:** 09/15/2023 03:51:31 - DAILY SelfTest received, 09/14/2023 03:51:38 - DAILY SelfTest received, 09/13/2023 03:51:35 - DAILY SelfTest received.
- Device Status:** AED is monitored and ready to be used (OK), 21% battery, 21% electrode charge, next electrode expiry: September 2025, next battery expiry: July 2027, signal strength: -72Gdcd.
- Map:** A map showing the device location in Neudöbberg, Eisenmny, with a search bar and map controls.

Bestellung zu richten an:

verkauf@notrufterminal.de

Fax: 089 97 89 31 27

Hiermit bestellen wir (Bitte exakte Rechnungsanschrift):

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Besteller _____

Lieferanschrift _____

Seriennummer _____

Sonderangebot zum Jahresbeginn 2025.

~~UVP 999,00*~~ - Sonderangebot befristet 499,00€*

CARDILINK Modul inklusive 4 Jahre Zugang auf CardiLink Cloud



Anzahl!

Preise netto zzgl. MwSt. und Versand- und Verpackungskosten von 9,95€ netto. Anschließend bei Verlängerung 12,00/monatlich. **Bestellung eingehend bis spätestens 31.07.2025.**

Ort, Datum
Firmenstempel

Unterschrift